

COMPO CAPS PRIMER

PREPARATORE PER COMPO CAPS



Prodotto per uso odontoiatrico.
Tenere lontano dalla portata
dei bambini.

Data delle specifiche: 06/2014

Confezione in commercio

Compo Caps:

scatola da 50 capsule monodose (**COD. CC C**)

Compo Caps Primer:

flacone da 5 ml (**COD. CC P**)

Caratteristiche

Compo Caps Primer è una soluzione progettata per pulire la cavità e per condizionare dentina e smalto, rafforzando così il legame tra Compo Caps e struttura del dente.

Composizione

Soluzione acqua di acido poliacrilico.

Dati tecnici

PH: 2.5

Densità (20°C): 0.93 g/cm³

Modo d'uso

Preparazione del dente

Preparare il dente utilizzando tecniche standard. Non preparare bordi sottili.

Le zone vicino alla polpa devono essere coperte con una piccola quantità di idrossido di calcio.

Applicazione

Dopo aver preparato il dente, applicare Compo Caps Primer strofinando la superficie del restauro con un pennello per 20 secondi.

Sciacquare Compo Caps Primer abbondantemente con acqua e asciugare delicatamente senza essiccare.

Ora Compo Caps può essere applicato.

Chiudere il flacone immediatamente dopo l'uso.

Incompatibilità

In soggetti predisposti, una sensibilizzazione al prodotto non può essere esclusa. In caso di reazioni allergiche interrompere l'utilizzo del prodotto e rimuoverlo completamente. In rari casi, possono verificarsi complicanze della polpa, nel caso in cui le raccomandazioni d'uso non sono state osservate.

Conservazione

Conservare Compo Caps Primer a temperatura ambiente (4-25°C). Non utilizzare dopo la data di scadenza.



Via Torino 765
21020 Mercallo (VA)
Tel. +39 0331 969270
Fax +39 0331 969271
www.deiitalia.it

F/CC P/O