

# DEI® EASY BOX

## MATERIALE PER IL BOXAGGIO DELL'IMPRONTA

Prodotto per uso professionale  
Tenere lontano dalla portata dei bambini  
Data delle specifiche: 07/2017

### Confezioni in commercio

1 barattolo con 5 strisce preformate **REF EB 1**

### Caratteristiche

DEI® Easy Box è un materiale in strisce preformate riutilizzabili di materiale malleabile plastico, utilizzabile per contornare tutti i tipi di impronta. DEI® Easy Box è ideale per la colatura del gesso DEI® G-Zero. DEI® Easy Box è di semplice e rapido utilizzo, è pronto all'uso ed economico.

### Modo d'impiego

1. Estrarre dalla confezione una striscia di DEI® Easy Box.
2. Avvolgere l'impronta da "boxare" con la striscia appena estratta, assicurarsi di farla aderire bene ai margini superiore ed inferiore.
3. Colare nell'impronta (sotto vibrazione in caso non si utilizzi il gesso DEI® G-Zero), al fine di creare il modello e la relativa zoccolatura. Dopo che il gesso è indurito, aprire la striscia ed estrarre il modello. Le strisce sono riutilizzabili.

### Conservazione

Conservare ad una temperatura compresa tra 5°C e 30°C.



Via Torino, 765 - 21020 Mercallo (VA) - Italy  
Tel. +39 0331 969270 - Fax +39 0331 969271  
[www.deiitalia.it](http://www.deiitalia.it)