



EASYCEM HARD

**CEMENTO PER FISSAGGI
PROVISORI SENZA EUGENOLO**



Prodotto ad uso odontoiatrico
Tenere lontano dalla portata dei bambini
Data delle specifiche: 07/2014

Confezioni in commercio

1 cartuccia da 50 ml (**COD. PROV 4**)
Cannule miscelatrici: 50 pezzi (**COD. PROV 5**)

Caratteristiche

EasyCem Hard è un cemento provvisorio senza eugenolo con ottime doti di adesione. È confezionato in cartuccia automiscelante per rendere più facile e veloce la sua applicazione.
Risponde ai requisiti ISO 3107.

Composizione

Organic acids, zinc oxide, methacrylates.

Dati tecnici

Miscelazione (Base/Catalizzatore): 1:1
Tempo di lavorazione (23°C): > 1:30 min.
Tempo di presa nel cavo orale (35°C):
2:00 - 3:00 min.
Resistenza alla flessione: 2.0 MPa

Vantaggi

- Risparmio di tempo (miscelazione automatica).

- Maggior pulizia (si applica direttamente).
- Minor spreco di materiale.
- Ottime proprietà (consistenza e adesioni ottimali).
- Facile da rimuovere.
- Economico (più di 200 cementazioni con una cartuccia).
- Senza eugenolo (non disturba la polimerizzazione di resine acriliche).

Modo d'impiego

Preparare la superficie da cementare. Pulire con pomice, lavare e asciugare. Applicare un sottile strato nella corona o ponte entro 1 minuto e 30 secondi inserire e tenere premuto per qualche secondo. Se il moncone è umido la ritenzione viene ridotta e la rimozione del provvisorio sarà più agevole. L'indurimento totale si otterrà entro 2/3 minuti. Ad indurimento ottenuto rimuovere gli eccessi.

Avvertenze

Lasciare la cannula sulla cartuccia sino all'utilizzo successivo. Eliminare il primo millimetro di materiale miscelato. In caso di sensibilità o allergia ai componenti non impiegare.
In caso di contatto con pelle o occhi, sciacquare immediatamente con acqua e consultare uno specialista.
In caso di ingestione, consultare un medico.

Conservazione e validità

Conservare a temperatura compresa tra 8°C e 25°C.



Via Torino 765 - 21020 Mercallo (VA)
Tel. +39 0331 969270 - Fax +39 0331 969271
www.deiitalia.it