

Via Torino, 765  
21020 Mercallo (Va)  
Tel. +39.0331.969270  
Fax +39.0331.969271  
www.deiitalia.it

REF GZ 1

# 3 Kg



Prodotto per uso professionale  
Tenere lontano dalla portata dei bambini  
Data delle specifiche: 07/2017

#### CONFEZIONI IN COMMERCIO

1 barattolo da 3 kg

#### DATI TECNICI

Rapporto acqua/polvere: ... 23ml/100g  
Tempo di lavorazione: ... 6 minuti  
Tempo di indurimento: ... 25 minuti  
Espansione di presa (2h): ... 0,01% max  
Resistenza alla compressione  
ad umido (1h): ... 60 MPa

# GZ ZERO

G E S S O E X T R A D U R O  
A D E S P A N S I O N E Z E R O  
(ideale per implantoprotesi)

#### CARATTERISTICHE

DEI® G-Zero è un gesso appositamente studiato per realizzare modelli master ultra precisi finalizzati alla realizzazione di manufatti di implantoprotesi.

DEI® G-Zero è ad espansione ZERO garantendo una passivazione assoluta della protesi.

Puo' essere colato senza vibratore evitando movimenti pericolosi dei monconi da impronta con speciali bande (DEI® Easy Box) riutilizzabili per un boxaggio veloce.

#### MODO D'IMPIEGO

1. Dosare 23 ml di acqua per 100 grammi di polvere.
2. Impastare sottovuoto, il gesso diventa liquido.
3. Colare a filo, senza vibrazione, nell'impronta boxata con le strisce DEI® Easy Box.
4. Rimuovere dall'impronta dopo minimo 1 ora.

Nota: in caso di colatura di un'impronta con monconi piccoli, prima di procedere alla colata del gesso, posizionare DEI® G-Zero all'interno del moncone con uno strumento idoneo.