

IDROSSIDO DI CALCIO RADIOPACO IN SIRINGA

PER COPERTURA DIRETTA
DELLA POLPA



Prodotto per uso odontoiatrico
Tenere fuori dalla portata dei bambini
Data delle specifiche: 03/2017

Confezioni in commercio

1 siringa da 2 ml e 4 puntali

REF IDRO 1

Caratteristiche

È un composto di idrossido di calcio ad alta concentrazione a base acquosa per copertura diretta e della polpa.

È anche indicato per:

- Chiusura provvisoria di canali radicolari
- Copertura indiretta della camera pulpale in caso di carie profonde.

Modo d'impiego

Lavare e asciugare la cavità, applicare l'idrossido di calcio a strati sottili fino a quando non è stato raggiunto lo spessore desiderato. Lasciare asciugare ogni strato naturalmente o asciugare, con attenzione, con aria secca.

Non applicare ai margini della cavità e rimuovere la pasta che è eventualmente rimasta attaccata ai margini stessi. Introdurre quindi il sottofondo e il materiale da otturazione.

Per l'otturazione provvisoria di canali radicolari, preparare e pulire il canale con acqua ossigenata al 3% e soluzione di ipoclorito di sodio, quindi inserire la pasta con uno spingipasta.

Evitare di eccedere con il materiale nell'otturazione (apicale) e di includere dell'aria.

È possibile ispezionare l'otturazione del canale mediante l'esecuzione di una lastra.

Rimuovere il materiale dopo 6-8 mesi.

Avvertenze

- L'idrossido di calcio è irritante per pelli, occhi, mucose.
- Proteggere gli occhi del paziente

prima dell'uso.

- Evitare il contatto!
- In caso di contatto sciacquare con abbondante acqua.
- Non usare dopo la scadenza.
- Non usare se la pasta è indurita.
- Dopo l'uso sterilizzare l'ago dispenser in autoclave a 121°C per 15 minuti.
- Non utilizzare in spessori elevati.

Conservazione e validità

Conservare a temperatura tra 8-25°C. Mai sotto gli 8°C.

Richiudere bene subito dopo l'uso per evitare che la pasta si indurisca. Se il materiale contenuto nella capsula protettiva è indurito è possibile riportarlo alla consistenza ottimale aggiungendo 1 o 2 gocce di acqua distillata.

Non utilizzare dopo la data di scadenza.



Via Torino, 765
21020 - Mercallo (VA) - Italy
Tel. +39 0331 969270
Fax +39 0331 969271
www.deiitalia.it