

Kit stampi per modelli di corone in cera

Caratteristiche

Lo stampo è realizzato in silicone di alta qualità, mantiene così la sua stabilità fino a 250°C.

Può riprodurre con precisione la parte oclusale e le faccette.

Lo stampo può essere riutilizzato facilitando la lavorazione in tempi rapidi, mantenendo una qualità elevata e costante.

La novità importante è che essendo lo stampo costituito da due parti, la faccetta oclusale risulta spessa solamente 0.5 mm e si velocizzano moltissimo i tempi per metterla in occlusione.

Sono disponibili nel kit 5 differenti stampi:

- Anteriore medio
- Anteriore grande
- Oclusale piccolo
- Oclusale medio
- Oclusale grande

Modo d'uso

1. Scegliere la giusta dimensione dello stampo per il modello.
2. Con l'aiuto della pipetta in vetro, posizionare la cera sciolta all'interno dello stampo e chiudere con la parte superiore.
3. Aspettare l'indurimento della cera e estrarre il preformato.
4. Applicare una piccola porzione di cera all'interno del preformato in cera e posizionarla sopra il moncone.
5. Regolare l'altezza e l'occlusione.
6. Modellare il lato vestibolare e il lato linguale (per posteriori).

Confezioni in commercio

Il kit contiene 5 differenti stampi (COD. FORM 1)