



PLASTICEM

**CEMENTO PER
OTTURAZIONI PROVVISORIE**

CE
0546

Prodotto per uso odontoiatrico
Tenere lontano dalla portata dei bambini
Data delle specifiche: 03/2017

Confezioni in commercio:

2 siringhe da 4 g cad.

REF PLAS 1

Caratteristiche

Plasticem è un cemento provvisorio fotopolimerizzabile a base resinosa che grazie alla sua consistenza e al suo modo di impiego offre importanti benefici.

Plasticem garantisce un reale sigillo della cavità, non si deteriora con la masticazione e può essere facilmente rimosso in un unico blocco.

Grazie alla consistenza che rimane elastica, la preparazione non viene danneggiata anche in presenza di sottosquadri. Plasticem può essere utilizzato anche per ribasare corone e ponti in policarbonato. Si evita così la formazione di infiltrazioni, la fastidiosa procedura di rimozione del cemento e il rischio di rovinare con la fresa i bordi della preparazione.

Composizione

Polymethacrylates, glass filler, fluorides, silica, polymer powder, catalyst, stabilizers.

Modo d'impiego

Dopo aver lavato e asciugato la cavità applicare Plasticem, condensare e fotopolimerizzare per 40 secondi dopo aver verificato l'occlusione.

Eventuali eccessi possono essere rimossi con gommini da rifinitura.

Per la rimozione agganciare il prodotto con uno strumento ed estrarlo.

Plasticem può aderire ad altri materiali sintetici tipo sottofondi ed è quindi consigliabile proteggerli con un lubrificante. DEI® Surface Hardener è indicato anche per questo tipo d'impiego.

Si possono fotopolimerizzare strati fino a 5 mm.

Avvertenze

Non usare prodotti contenenti eugenolo in abbinamento.

Non impiegare il prodotto in caso di sensibilità o allergia individuale a metacrilati.

Plasticem è un prodotto fotopolimerizzabile e teme quindi l'esposizione alla luce.

Conservazione e validità

Conservare a temperatura non superiore a 25°C.

Una volta aperto conservare il prodotto a temperatura compresa tra 18-25°C.

È consigliabile tenere al freddo il prodotto, nel caso in cui lo stesso non dovesse venir impiegato per diverso tempo. Non esporre alla luce. Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza.



DEI® italia

Via Torino, 765 - 21020 Merello (VA)
Tel. +39 0331 969270 - Fax +39 0331 969271
www.deiitalia.it