

Confezioni in commercioPreceasy Liquido **500 ml**Preceasy Polvere Opaca **1 Kg**Preceasy Polvere Rosa Traslucente **1 Kg**

REF COD. PREC 3

REF COD. PREC 0

REF COD. PREC 7

Prodotto ad uso professionale

Tenere lontano dalla portata dei bambini

Data delle specifiche: 10/2019

EN ISO 20795-1 TYPE II, CLASS 1

Caratteristiche e classificazione

DEI® Lab Preceasy è una resina a freddo che offre una elevata stabilità del colore nel tempo grazie ai bassissimi coefficienti di assorbimento e ad una innovativa formulazione chimica. È molto facile da lavorare grazie alla particolare fluidità e modellabilità. È utilizzabile sia con la tecnica di zeppatura che di colaggio. DEI® Lab Preceasy è indicata anche per lavori estesi grazie ai tempi di lavorazione ottimali.

Composizione

Methylmethacrylate, Cross linker.

Dati tecnici

Polimerizzazione:

ca. 15 min/45°C

Fase fluida:

ca. 3 minuti

Rapporto di miscelazione:

10:7

Durezza Vicker:

ca. 16 Kp/mm²

Resistenza alla flessione:

ca. 2500 N/mm²

Assorbimento dell'acqua:

ca. 25,7 µg/mm³

Solubilità dell'acqua:

ca. 0,6 µg/mm³**Modo d'impiego**

Miscelare aggiungendo la polvere al liquido in rapporto di 10:7. Per la tecnica di colatura può essere impiegata entro 3/4 minuti; dopo tale periodo può essere zeppata. Durante la fase plastica è possibile modellarla. Dopo massimo 8 minuti deve essere polimerizzata sotto pressione.



DEI® Lab
preceasy
resina per protesi autopolimerizzante
liquido 500 ml



Via Torino, 765 - 21020 Mercurio (Va) - Italy
Tel. +39.0331.969270 - www.deiitalia.it

Indicazioni

Protesi totali, parziali, combinate, ribasature, riparazioni.

Tempo di lavorazione

Fase di colata: 2-3 minuti

Fase plastica: 5 minuti a temperatura ambiente (23°C)

Polimerizzazione

Tempo di polimerizzazione nel polimerizzatore 15 minuti sotto la pressione di 2-4 bar, ad una temperatura dell'acqua di 45°C.

Avvertenze

I tempi di lavorazione sono in stretta relazione con la temperatura ambiente, risulteranno più lunghi a temperature inferiori e più brevi a temperature superiori a 23°C.


Liquido e vapori facilmente infiammabili. Provoca irritazione cutanea. Può provocare una reazione allergica cutanea. Può irritare le vie respiratorie. Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate. Non fumare. Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/a prova di esplosione. In caso di contatto con la pelle (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.

Conservazione

Conservare a temperatura compresa tra 10 e 25°C.

DISPOSITIVO MEDICO / MEDICAL DEVICE

PERICOLO
CONTIENE
METACRILATO
DI METILE

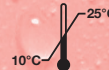

CE 0425

E/PREC/6