

COMPOSIZIONE 100 g di polvere contengono:
Sodio percarbonato 46,5%, tetraacetiltiendiidrammina
31%, tensioattivi anionici non ionici <5%, stabilizzanti,
complessanti, alcalinizzanti, inibitori di corrosione ed
enzimi q.b. a 100 g.

PROPRIETÀ Virucida (compreso HBV, HCV e HIV), sporicida,
tubercolicida, fungicida e battericida. Il prodotto alle diluizioni
d'uso indicate non danneggia i materiali. Le soluzioni d'uso
sono inodori ed hanno una rapida azione dissolvente di sangue,
proteine e grassi.

CAMPI D'IMPIEGO Decontaminazione, alta disinfezione con
contemporanea detersione di strumentario chirurgico e dispositivi
medici.

MODALITÀ D'USO - DOSAGGI SteriCold va reso attivo sciogliendolo
in acqua di rubinetto a 28-30°C ed agitando alcuni minuti per favorire
la dissoluzione del prodotto. Lasciare passare 10 minuti per ottenere
la soluzione attiva (massimizzata dopo 30 minuti in processi di
sterilizzazione a freddo).

CONCENTRAZIONI D'IMPIEGO	DOSE DI UTILIZZO	TEMPO DI IMMERSIONE
Detersione e disinfezione primaria	0,5 % 1 misurino da 20 g in 4 litri di acqua di rubinetto	10 minuti
Decontaminazione con azione virucida (HIV, HBV, HCV) ed alta disinfezione (TBC)	1 % 1 misurino da 20 g in 2 litri di acqua di rubinetto	10 minuti
Disinfezione (TBC)	1 % 1 misurino da 20 g in 2 litri d'acqua di rubinetto	10 minuti
Disinfezione di alto livello (sterilizzazione chimica a freddo)	2 % 1 misurino da 20 g in 1 litro d'acqua di rubinetto	10 minuti

Misurino pieno = 20 g

La soluzione di utilizzo deve essere rinnovata almeno giornalmente. Richiudere
il contenitore dopo aver prelevato la dose di prodotto. Il prodotto può essere
utilizzato in vasche ad ultrasuoni. Dopo il trattamento, prelievo asettico e
risciacquo con acqua sterile del dispositivo trattato. Conservare le soluzioni in
recipiente chiuso e rinnovarle almeno giornalmente.

L'intimo contatto delle soluzioni con le superfici da disinfettare può essere
realizzato manualmente per immersione su vasche (anche ad ultrasuoni) o
con l'ausilio di apparecchiature (levastrumenti).

Leggere il manuale d'uso del dispositivo medico soggetto al trattamento
nella parte pertinente la pulizia, disinfezione e sterilizzazione.

Evitare il contatto delle superfici da trattare con il prodotto indiscioltto.

Non impiegare con dispositivi monouso.

Stericold è incompatibile con rame e sue leghe



Non disperdere il contenitore
nell'ambiente dopo l'uso

SteriCold

DISINFETTANTE STERILIZZANTE CHIMICO A FREDDO

Detergente-disinfettante-sporicida
a base di acido peracetico
con enzimi attivi
per un'azione combinata

(COD. COLD 1)



DEI® italia

Via Torino, 765 - 21020 Mercallo (Va)
Tel. +39 0331 969270 - Fax +39 0331 969271
www.deitalia.it

AVVERTENZE



NOCIVO

R22: nocivo per ingestione

R41: Rischio di gravi lesioni oculari

S25: Evitare il contatto con gli occhi

S26: In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente
ed abbondantemente con acqua e consultare il medico
S7/8: Conservare il recipiente ben chiuso
ed al riparo dall'umidità

Contiene enzimi: può provocare una reazione allergica

USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE

SteriCold è un dispositivo medico disinfettante
di classe IIb ai sensi e per gli effetti della
direttiva CE 93/42 e succ. M.I.



0546

DISTRIBUITO IN ESCLUSIVA DA

DEI® italia s.r.l.

21020 Mercallo (VA) Italy

Tel. + 39 0331 969270

FABBRICANTE: MONDIAL S.n.c.

35010 Limena (PD) Italy

Tel. +39 049 768712



Attenersi scrupolosamente
alle istruzioni d'uso

LOT



SCAD.



2 Kg e

Rev. 09/2010