

SUPERBITE

MATERIALE PER REGISTRAZIONE OCCLUSALE



Prodotto per uso odontoiatrico

Tenere lontano dalla portata dei bambini

Data delle specifiche: 02/2014

Confezione in commercio

1 cartuccia da 50 ml e 6 cannule di miscelazione
(COD. SB 1)

Caratteristiche

Superbite è un materiale creato su base composta per registrazione occlusale e bloccaggio transfer. È estremamente rigido, stabile per mesi, ad indurimento rapido confezionato in cartucce.

Impiego

Applicare il prodotto direttamente sulla superficie occlusale asciutta fino a max 4 cm (4 elementi). Per registrazioni più ampie, procedere per segmenti.

Rilevare la masticazione entro 30 secondi dall'applicazione.

Dopo 30/45 secondi far aprire leggermente il morso e richiudere per facilitare la rimozione.

Dopo ulteriori 30 secondi rimuovere dal cavo orale.

I tempi indicati valgono per temperature di 23°C.

In caso di uso sull'arcata intera, applicare in segmenti.

In caso di presenza di strutture acriliche, isolarle bene con vaselina o altri prodotti adatti.

Evitare il contatto con soluzioni per retrazione gengivale. Una volta indurito rimuovere la superficie di inibizione superficiale con alcool etilico e disinfettare con spray DEI® 30".

Dati tecnici

Tempi di lavorazione:	> 30"
Tempi di indurimento nel cavo orale:	1':30"
Rapporto miscelazione:	10:1
Shore D Hardness:	75
Modulo elastico:	70 MPa

Avvertenze

Scartare il primo materiale estruso dalla cartuccia nuova della dimensione di un pisello che potrebbe essere mal miscelato.

Non riutilizzare il tappo della cartuccia ma lasciare la cannula miscelatrice in posizione dopo l'uso. Evitare il contatto con soluzioni per retrazione gengivale che possono inibire la polimerizzazione.

Rimuovere lo strato di inibizione con alcool dopo l'indurimento nel cavo orale e quindi disinfettare con DEI® Sicursept o con soluzioni adatte.

Superbite non contiene methyl metacrilati ma contiene altri acrilati e in pazienti ipersensibili non possono essere escluse reazioni allergiche. In caso di conoscenza di allergie, non utilizzare.

Evitare il contatto con pelle, mucose, occhi. In caso di contatto lavare bene la zona con acqua e sapone. In caso di contatto con occhi consultare uno specialista.

Conservazione

Conservare a temperature inferiori a 25°C.



Via Torino, 765
21020 Mercallo (VA)
Tel. +39 0331 969270
Fax +39 0331 969271
www.deiitalia.it