

monosafe

COMPOSITO UNIVERSALE PER RESTAURI ESTETICI



Monodose da 0.2 g

ELIMINA TOTALMENTE I RISCHI DA INFEZIONE CROCIATA

CARATTERISTICHE

DEI® Monosafe è un composito microibrido di ultima generazione utilizzabile per ogni tipo di restauro, è confezionato in pratici blister monodose per evitare la contaminazione crociata.

DEI® Monosafe può essere anche impiegato per splintaggi, intarsi e ricostruzioni.

VANTAGGI

- Facile nella scelta del colore.
- Facile da usare e maneggevole.
Il materiale non si appiccica agli strumenti ed ha una consistenza ideale per una perfetta condensazione.
- Facile da modellare e da rifinire.
- Perfetta congiunzione del restauro con lo smalto.
- Stabilità del colore.
- Resistente all'abrasione, superiore di quattro volte ai microfill.
- Radiopaco.



Facile da aprire



Pronto all'uso




Facile da applicare



Sicuro da smaltire

monosafe

COMPOSITO UNIVERSALE PER RESTAURI ESTETICI

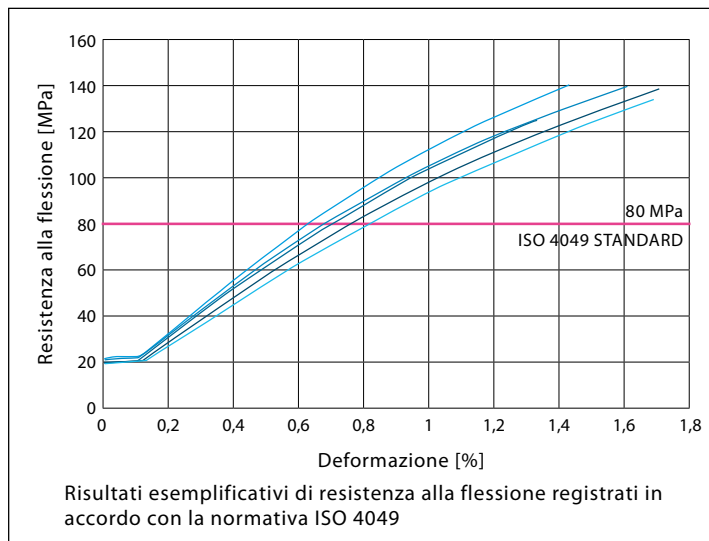

MODO D'IMPIEGO

- Preparare la cavità.
- In caso di cavità profonde impiegare un liner.
- Applicare il protocollo adesivo secondo le istruzioni del prodotto, consigliamo l'uso di DEI® New Extra Bond.
- Sollevare il foglio di alluminio sigillante e aprire il blister.
- Prelevare il composito con lo strumento.
- Riempire la cavità a strati non superiori a 2 mm e fotopolimerizzare ogni strato per 30 secondi.

TECNICA DI RIFINITURA

Prima di fotopolimerizzare l'ultimo strato di composito, applicare DEI® Surface Hardener e fotopolimerizzare per 40 secondi, lavare e asciugare. L'indurimento del composito sarà completo.

Utilizzando questo prodotto si evita di dover eliminare lo strato di inibizione superficiale con frese o altri prodotti riducendo così i tempi di lavorazione.

Rimuovere il gel DEI® Surface Hardener dopo la polimerizzazione, passare un microbrush con alcool etilico sulla superficie. Applicare con un pennello monouso un leggero strato di DEI® Seal Coat Fast sulla superficie, soffiare con aria pulita, priva di olio o acqua per distribuire meglio il prodotto, passare un pennello pulito o un microbrush per eliminare gli eccessi, lasciare agire 10 secondi e fotopolimerizzare per 90 secondi. Rimuovere lo strato superficiale di DEI® Seal Coat Fast con DEI® Polish Paste e spazzolino di pelo di capra e lucidare con spazzolino di cotone o Polish Felt. DEI® Seal Coat Fast rimarrà a sigillo delle microporosità. A lavoro finito si otterrà una superficie estremamente dura, resistente e lucida. Inoltre questa tecnica permette di ridurre notevolmente sul dente restaurato la formazione del tartaro e della placca batterica.

[Vd. lavoro scientifico Università di Trieste]

CONFEZIONI IN COMMERCIO

DEI® Monosafe contiene:

10 blister monodose da 0.2 g disponibile nei colori:

A1 [REF. MSA1], A2 [REF. MSA2], A3 [REF. MSA3],
A3,5 [REF. MSA35], B2 [REF. MSB2], C2 [REF. MSC2],
Opaco A2 [REF. MSAO2], Incisale [REF. MSINC].

DATI TECNICI

Riempitivo in peso: 78%

Resistenza alla flessione: 135 MPa

Assorbimento d'acqua: 16 µg/mm³

Solubilità in acqua: 0.7 µg/mm³

COMPOSIZIONE

DEI® Monosafe contiene resine dimetacrilate e riempitivi per il 78% in peso.

**QUALITÀ E PRESTAZIONI
SENZA COMPROMESSI**