

deLab EASYTEMP2

**RESINA
AUTOPOLIMERIZZANTE
PER PONTI E CORONE
PROVVISORIE**

CE
0425



Prodotto ad uso odontoiatrico
Tenere lontano dalla portata dei bambini
Data delle specifiche: 10/2019

CONFEZIONI IN COMMERCIO

- Polvere chiara (100 g) **REF EASY 6**
- Polvere scura (100 g) **REF EASY 7**
- Smalto (100 g) **REF EASY 9**
- Liquido (100 ml) **REF EASY 8**

CARATTERISTICHE

Easytemp2 è una resina a base di polimetilmetacrilato priva di cadmio indicata per la produzione di ponti e corone con metodo diretto e indiretto.

Ha una bassissima retrazione da polimerizzazione e non scalda durante l'indurimento.

La sua formulazione priva di amine terziarie garantisce il massimo risultato in termini di fedeltà di riproduzione.

COMPOSIZIONE

Polvere:

Bead polymer from methylmethacrylate and alkylmethacrylate
Derivatives of barbituric acid

Liquido:

Methylmethacrylate
n-Alkylmethacrylate
Cross linker

MODO D'IMPIEGO

Miscelazione e regolazione del calore:
Per la miscelazione di Easytemp2 il dosaggio è libero.

La consistenza dovrebbe comunque essere cremosa-fluida fino a pastosa, che corrisponde ad una proporzione di miscela polvere: liquido da 1.8 fino a 2.2:1.

Per primo si versa il liquido in una tazza. Per una corona occorrono circa 8 goccie di liquido. Attraverso il versamento della polvere chiara o della polvere scura, il colore del provvisorio può essere individualizzato.

TECNICA INDIRECTA:

È possibile utilizzare mascherine termoformate o in silicone.

Miscelare come descritto e colare la massa direttamente dentro la mascherina. Il tempo di lavorazione, dal versamento della polvere nel liquido fino all'applicazione sul modello isolato non deve superare i 2 minuti.

La mascherina deve essere riposizionata sul modello esattamente, per evitare un rialzo di articolazione con conseguenti ritocchi correttivi in bocca al paziente.

Dopo circa 3-4 minuti il provvisorio con la mascherina vengono tolti dal modello con cautela.

Inizia quindi la fase elastica. Durante questo tempo, circa 1,5 minuti, togliere con una forbice gli eccessi. Fino all'indurimento finale il provvisorio rimane nella mascherina per un tempo di circa 2 minuti. Dopo l'indurimento finale i margini del provvisorio vengono rifiniti e lucidati.

Easytemp2 è riparabile.

TECNICA DIRETTA:

A) Tecnica con l'impronta

Prima della preparazione dei denti, prendere un'impronta in alginato o in silicone e conservare l'impronta. Dopo la preparazione dei denti miscelare Easytemp2 come sopra descritto. Togliere eventualmente i setti interdentali che potrebbero rendere difficile un riposizionamento dell'impronta.

Asciugare l'impronta con aria compressa e colare la miscela pronta di Easytemp2 direttamente nella zona desiderata dell'impronta.

Il tempo di lavorazione è di circa 2 minuti. Prima di applicare in bocca l'impronta riempita di Easytemp2 è necessario isolare i monconi preparati (per esempio con vaselina).

Applicare quindi in bocca l'impronta con Easytemp2.

Easytemp2 indurisce lentamente.

Dopo circa 3 minuti e mezzo è possibile togliere il provvisorio durante la sua fase elastica. Ciò evita l'adesione di Easytemp2 con i denti preparati.

Nel caso in cui il provvisorio aderisca alla preparazione, toglierlo con cautela e riposizionarlo nell'impronta per l'indurimento finale.

Dopo l'indurimento il provvisorio è stabile nella forma e può essere rifinito e lucidato facilmente.

B) Tecnica della mascherina termoformata.

Se si desidera meno contrasto cromatico tra smalto e dentina è possibile aggiungere della polvere di dentina all'impasto dello smalto.

Una volta rifinita e pulita con alcool etilico, Easytemp2 può essere caratterizzata con Seal Coat Fast più Stains in polvere. In caso di necessità è possibile modificare la tinta utilizzando Seal Coat Fast più modificatori di croma in polvere (Feniiiix).

AVVERTENZE

Il prodotto contiene resine metilmetacrilate e hexylmethacrilate, infiammabile! Non fumare durante l'uso, tenere lontano da fonti di calore.

Irritante, non mettere a contatto con la pelle, gengive, occhi. Non inalare.

In caso di contatto sciacquare con abbondante acqua, per il caso di contatto con gli occhi dopo aver sciacquato contattare subito uno specialista.

Chiudere bene i flaconi dopo l'uso. In caso di ipersensibilità del paziente ai componenti non impiegare.

Bead polymer contiene 0,2% a 0,5% residuo di benzoylperoxide.

CONSERVAZIONE

Conservare all'asciutto, al riparo da fonti di calore a temperature tra 10°C e 30°C (Polvere e Smalto) e tra 10°C e 25°C (Liquido).

Tenere ben chiusi i flaconi dopo l'uso.

 **DEI® italia**

Via Torino, 765
21020 Mercurio (VA) - Italy
Tel. +39 0331 969270
Fax +39 0331 969271
www.deiitalia.it