

DEI® Rainbow

Fit Crown

**VINILPOLISILOSSANO
PER IL CONTROLLO
DEI PUNTI DI FRIZIONE**



Prodotto ad uso odontoiatrico.
Tenere lontano dalla portata dei bambini.
Data delle specifiche: 01/2018

Confezioni in commercio
2 cartucce da 50 ml

REF FIT 1

Caratteristiche

DEI® Rainbow Fit Crown è un vinilpolisilossano specificamente studiato per il controllo dei punti di frizione nelle corone protesiche e negli intarsi. Può essere utilizzato anche per il controllo dei punti di pressione di protesi mobili parziali e totali.

Vantaggi

Ha un elevato shore A (80) che consente di fresare i punti di contatto senza che il prodotto ostruisca la lavorazione. Tempi di lavorazione ottimali anche per una arcata completa. Fluidità ideale per evitare resistenze nell'inserimento. Elevata opacità per evidenziare le aree di frizione.

Modo d'impiego

Il prodotto è automiscelante. Dopo aver posizionato la cannula sulla cartuccia erogare direttamente in situ. Posizionare la protesi nel cavo orale entro 50 sec.

Attendere il completamento della vulcanizzazione, due minuti circa.

Lasciare la cannula utilizzata inserita sino all'uso successivo.

PROTESI MOBILE NUOVA CON TECNICA DI IMPRONTA DINAMICA

Far preparare dal tecnico il cucchiaino funzionale individuale spessorato.

Applicare il bordaggio sul cucchiaino con DEI® Rainbow Putty Soft, inserire nel cavo orale e far eseguire i movimenti labiali (succhiare il dito).

Rimuovere il cucchiaino ad indurimento avvenuto e applicare nel cucchiaino DEI® Rainbow Fit Crown e reinserire nel cavo orale.

Tutti i punti di pressione devono essere scaricati con trapano dopo averli evidenziati con pennarello. Riposizionare DEI® Rainbow Fit Crown nei punti dove si è intervenuti e riposizionare in bocca, ripetendo la procedura fino a quando non si evidenzieranno più punti di pressione. Volendo è possibile ribasare con DEI® Rainbow Hydro Light.

PROTESI MOBILE NUOVA

Tecnica d'impronta statica.

Si consiglia di far eseguire il cucchiaino funzionale individuale. Applicare DEI® Rainbow Fit Crown e rilevare l'impronta. In caso di evidenziazione di punti di pressione rimuoverli come sopra, aggiungere DEI® Rainbow Fit Crown nelle zone ritoccate e reinserire nel cavo orale. Ribasare con DEI® Rainbow Hydro Light.

VERIFICA DI BIOFUNZIONALITÀ DELLA PROTESI NUOVA NEL CAVO ORALE

Per prevenire i problemi al paziente è possibile, alla consegna della nuova protesi, effettuare una prova con DEI® Rainbow Fit Crown per evidenziare eventuali punti di pressione che potrebbero causare dolore, lacerazioni e ferite.

Applicare DEI® Rainbow Fit Crown all'interno della protesi e posizionarla nel cavo orale. Ritoccare i punti dove viene evidenziato il punto di pressione. Eliminare dalla protesi DEI® Rainbow Fit Crown residuo che si staccherà agevolmente.

Non è possibile intervenire sul bordaggio e sul Postdam dove il punto di pressione deve essere presente per la tenuta della protesi.

RIBASATURA DIRETTA (IN STUDIO)

Applicare DEI® Rainbow Fit Crown e posizionare nel cavo orale per verificare eventuali punti di pressione.

Rimuoverli e riapplicare DEI® Rainbow Fit Crown per il controllo dell'efficacia dell'intervento.

Rimuovere DEI® Rainbow Fit Crown.

Eliminare dalla vecchia protesi 2-3 millimetri di resina e procedere con la ribasatura con DEI® New Ribasil o DEI® Ribasil Hard.

RIBASATURA INDIRETTA

Applicare DEI® Rainbow Fit Crown e posizionare nel cavo orale per verificare eventuali punti di pressione.

Rimuoverli e riapplicare DEI® Rainbow Fit Crown per il controllo dell'efficacia dell'intervento.

Quando non saranno più presenti punti di pressione la protesi è pronta per essere consegnata al tecnico.

PROTESI FISSA: CORONE PROTESICHE O PONTI DA CEMENTARE CON TECNICA ADESIVA

Inserire nella corona DEI® Rainbow Fit Crown, introdurre la corona o il ponte nel cavo orale e verificare che non ci siano punti di contatto all'interno della corona che possono interferire con il moncone. Il contatto deve essere evidenziato solo nella spalla per le preparazioni con angolo a 90° o a 50° etc.

Nelle preparazioni a finire DEI® Rainbow Fit Crown dovrà essere tagliato dalla corona per evidenziare il contatto perfetto di tutta la circonferenza della corona protesica con la preparazione.

PERNI MONCONE

Inserire DEI® Rainbow Fit Crown direttamente nella preparazione radicolare, inserire il perno e verificare.

Avvertenze

I tempi di lavorazione e vulcanizzazione sono altamente influenzati dalla temperatura di stoccaggio e impiego. Temperature elevate accorciano i tempi, temperature basse li allungano.

Conservazione e validità

Conservare a temperatura non superiore ai 28°C.



Via Torino, 765 - 21020 Mercallo (VA) - Italy
Tel. +39 0331 969270 - Fax +39 0331 969271
www.deitalia.it

DEI® Rainbow

Fit Crown

**VINYLPOLYSILOXANE
FOR CONTROL
OF FRICTION POINTS**



Product for dental use
Keep out from children
Date of specifications: 01/2018

Available package

Two 50 ml cartridges  REF FIT 1

Characteristics

DEI® Rainbow Fit Crown is a vinyl-polysiloxane specifically designed for control of friction points in prosthetic crowns and inlays. It can also be used for control of pressure points of partial and total mobile prosthesis.

Advantages

It has a high shore A (80) which allows the milling of contact points without block of processing by the product. Times of processing optimal even for a full arch. The ideal consistency allows to insert the prostheses without any resistance.

High opacity to highlight areas of friction.

Way of use

The product is auto-mixing. After positioning of the cannula on the cartridge dispense directly in situ. Place the prosthesis in the oral cavity within 50 seconds.

Wait for the completion of curing, about two minutes.

Leave the cannula inserted used until next use.

Cautions

The times of processing and curing are highly influenced by temperature of storage and use. High temperatures shorten times, low temperatures lengthen them.

Storage and shelf life

Store at room temperature not exceeding 28°C.



Via Torino, 765 - 21020 Mercurio (VA) - Italy
Phone +39 0331 969270 - Fax +39 0331 969271
www.deiitalia.it