

DEI® experience kit opaco Studio

CE
0546



Prodotto per uso odontoiatrico.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Data delle specifiche: 03/2014.

CONFEZIONI IN COMMERCIO

1 barattolo di polvere da 3 g, 1 flacone di liquido da 5 ml e vari accessori per la lavorazione.

Colore B1 (COD. EXOSB1).

CARATTERISTICHE

DEI® experience Opaco Studio è un sistema opacizzante fotopolimerizzante. Consiste in una polvere da miscelare con un liquido.

APPLICAZIONE

Evitare contaminazioni con sangue saliva e acqua durante il protocollo operativo. Utilizzare la diga in gomma. Pulire e irruvidire la superficie. Applicare DEI® Metal Prime seguendo le istruzioni.

Applicare DEI® Extra Bond (miscelato con DEI® Extra Catalyst in rapporto 1:1) e fotopolimerizzare 10 secondi.

DEI® experience Opaco Studio deve essere miscelato in rapporto 1:1 in peso ovvero 0.02 di polvere con una goccia di liquido. Il tempo di miscelazione deve essere di circa 1 minuto con accortezza di non esporre a luce diretta.

Fotopolimerizzare per 60 secondi.

Un leggero strato di inibizione superficiale è normale e aiuterà il legame con il materiale composito o con lo strato di opaco successivo se sarà necessario.

Non contaminare la superficie o rimuovere lo strato di dispersione.

AVVERTENZE

- Liquido:

Altamente infiammabile irritante per gli occhi, evitare il contatto con la pelle indossare guanti durante l'uso. In caso di contatto con gli occhi sciacquare e contattare uno specialista.

Conservare in frigorifero.

- Polvere:

Non inalare, evitare il contatto con la pelle.

Il prodotto NON contiene methylmetacrylate.

CONSERVAZIONE

Chiudere bene il flacone del liquido e il barattolo della polvere immediatamente ad ogni impiego. Se venissero lasciati aperti il prodotto si deteriorerebbe e non rispetterebbe le sue caratteristiche di impiego. Conservare il prodotto in frigorifero (2-8°C). Tenere lontano da fonti di luce e calore.



Via Torino, 765 - 21020 Mercallo (VA)
Tel. +39 0331 969270
Fax +39 0331 969271
www.deitalia.it