

DEI® Clever Post

**COMPOSITO FOTOPOLIMERIZZABILE
AD ALTA DENSITÀ
PER RESTAURI DI DENTI POSTERIORI**

CE
0546

Prodotto per uso odontoiatrico
Tenere fuori dalla portata dei bambini
Data delle specifiche: 01/2018

Confezioni in commercio

2 siringhe da 4,5 g disponibili nei colori:

A2 **[REF] COM 41** A3 **[REF] COM 42** A3.5 **[REF] COM 43**

Caratteristiche

DEI® Clever Post è un composito condensabile fotopolimerizzabile altamente riempito realizzato per soddisfare le richieste della moderna conservativa estetica dei quadranti posteriori.

Risponde alle norme ISO 4049.

DEI® Clever Post si distingue per le sue particolari doti di resistenza all'abrasione ed elevata lucidabilità.

DEI® Clever Post è radiopaco e rilascia fluoro per un periodo di tempo a beneficio dello smalto limitrofo che viene rimineralizzato e rinforzato.

DEI® Clever Post mostra una eccellente stabilità del colore.

Composizione

Resine su base BIS-GMA. Riempimenti vetrosi radiopachi. Silicio. Polvere di polimero. Catalizzatori, stabilizzatori, pigmenti. Totale riempimenti in peso 83%.

Modo d'uso

Preparazione della cavità

Pretrattare lo smalto con acqua e pomice. Isolare il campo operatorio con diga, la preparazione non dovrà essere contaminata con saliva o altro. Preparare la cavità cercando di conservare più smalto possibile. Per migliorare la chiusura dei margini e la sicurezza finale del restauro, bisellare i bordi di 45/60 gradi. Nelle preparazioni dei denti posteriori, evitare di lasciare smalto senza supporto di dentina.

Tecnica della mordanatura

Applicare l'acido mordanante solo sullo smalto con l'accortezza di coprire il bisello e di non bagnare la dentina. Lasciare agire l'acido per 30 secondi. Sui denti più mineralizzati, lasciare agire l'acido per 60/120 secondi, sciacquare per 20 secondi. Asciugare con aria. Lo smalto mordanato dovrà avere l'aspetto gessoso; in caso contrario o in caso di contaminazione con olio o acqua o saliva, ripetere

l'operazione.

L'acido mordanante è irritante per la pelle, le mucose e gli occhi. Evitare quindi il contatto. In caso contrario sciacquare abbondantemente con acqua ed eventualmente contattare uno specialista.

Tecnica di preparazione adesiva

Consigliamo vivamente l'impiego di DEI® New Extra Bond, una sistematica adesiva di ultima generazione che garantisce forti valori di adesione costante negli anni. Per l'uso seguire le istruzioni.

Applicazione del composito

Applicare il composito a strati non superiori a 3 mm. Fotopolimerizzare per 40 secondi ogni strato. Ripetere l'operazione sino a completo restauro del dente.

Tecnica di rifinitura

Prima di fotopolimerizzare l'ultimo strato di composito, applicare DEI® Surface Hardener e fotopolimerizzare per 40 secondi, lavare e asciugare. L'indurimento del composito sarà completo. Utilizzando questo prodotto si evita di dover eliminare lo strato di inibizione superficiale con frese o altri prodotti riducendo i tempi di lavorazione.

Se si desidera aumentare l'estetica e la resistenza della ricostruzione applicare DEI® experience Seal Coat Fast.

Fotopolimerizzare per 90 secondi.

Passare uno spazzolino di pelo di capra con pasta abrasiva per eliminare la parte superficiale e lucidare con un moccione di cotone. A lavoro finito si otterrà una superficie estremamente dura, resistente e lucida. Inoltre questa tecnica permette di ridurre notevolmente la formazione di placca batterica e di tartaro.

Avvertenze

Nei restauri con materiale composito non usare prodotti contenenti eugenolo. Conservare in ambienti con temperatura fresca e costante inferiore a 25°C. Non esporre a fonti di luce o di calore. Dopo l'uso richiudere la siringa con l'apposito tappo. Per ridurre la pressione del materiale, ruotare lo stantuffo di mezzo giro in senso antiorario. Non mettere a contatto con la pelle, in casi singoli può verificarsi una ipersensibilità ai componenti. In tal caso non impiegare. Per l'impiego dei prodotti accessori al composito, leggere sempre le istruzioni per l'uso del prodotto specifico.

Conservazione

Il prodotto va conservato a una temperatura inferiore di 25°C.



Via Torino 765 - 21020 Mercallo (VA) - Italy
Tel. +39 0331 969270 - Fax +39 0331 969271
www.deiitalia.it - info@deiitalia.it

F/COM4/5