

COMPOSIZIONE 100 g di polvere contengono:
 percarbonato di sodio 46,5%,
 tetraacetiltettilendiammina 31%, tensioattivi
 anionici non ionici <5%, stabilizzanti, complessanti,
 alcalinizzanti, inibitori di corrosione ed enzimi q.b. a 100 g.

PROPRIETÀ Virucida (compreso HBV, HCV e HIV), sporicida, tubercolicida, fungicida e battericida. Il prodotto alle diluizioni d'uso indicate non danneggia i materiali. Le soluzioni d'uso sono inodori ed hanno una rapida azione dissolvente di sangue, proteine e grassi.

CAMPI D'IMPIEGO Decontaminazione, alta disinfezione con contemporanea detersione di strumentario chirurgico e dispositivi medici.

MODALITÀ D'USO - DOSAGGI SteriCold va reso attivo sciogliendolo in acqua di rubinetto a 28-30°C ed agitando alcuni minuti per favorire la dissoluzione del prodotto. Lasciare passare 10 minuti per ottenere la soluzione attiva (massimizzata dopo 30 minuti in processi di sterilizzazione a freddo).

CONCENTRAZIONI D'IMPIEGO	DOSE DI UTILIZZO	TEMPO DI IMMERSIONE
Detersione e disinfezione primaria	0,5 % 1 misurino da 20 g in 4 litri di acqua di rubinetto	10 minuti
Decontaminazione con azione virucida (HIV, HBV, HCV) ed alta disinfezione (TBC)	1 % 1 misurino da 20 g in 2 litri di acqua di rubinetto	10 minuti
Disinfezione (TBC)	1 % 1 misurino da 20 g in 2 litri d'acqua di rubinetto	10 minuti
Disinfezione di alto livello (sterilizzazione chimica a freddo)	2 % 1 misurino da 20 g in 1 litro d'acqua di rubinetto	10 minuti

Misurino pieno = 20 g

La soluzione di utilizzo deve essere rinnovata almeno giornalmente. Richiudere il contenitore dopo aver prelevato la dose di prodotto. Il prodotto può essere utilizzato in vasche ad ultrasuoni. Dopo il trattamento, prelievo asettico e risciacquo con acqua sterile del dispositivo trattato. Conservare le soluzioni in recipiente chiuso e rinnovarle almeno giornalmente.

L'intimo contatto delle soluzioni con le superfici da disinfettare può essere realizzato manualmente per immersione su vasche (anche ad ultrasuoni) o con l'ausilio di apparecchiature (lavastumenti).

Leggere il manuale d'uso del dispositivo medico soggetto al trattamento nella parte pertinente la pulizia, disinfezione e sterilizzazione.

Evitare il contatto delle superfici da trattare con il prodotto indisciolto.

Non impiegare con dispositivi monouso.

SteriCold è incompatibile con rame e sue leghe.



Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso

SteriCold

DISINFETTANTE STERILIZZANTE CHIMICO A FREDDO

Detergente-disinfettante-sporicida
a base di acido peracetico
con enzimi attivi
per un'azione combinata

2 Kg

(COD. COLD 1)



DEI® italia

Via Torino, 765 - 21020 Mercurio (VA)
 Tel. +39 0331 969270 - Fax +39 0331 969271
 www.deitalia.it



AVVERTENZE

H302: Nocivo se ingerito.
 H318: Provoca gravi lesioni oculari
 EUH208: Contiene: Enzimi.

Può provocare una reazione allergica.

P264: Lavare accuratamente con acqua dopo l'uso.

P280: Indossare guanti / indumenti protettivi / proteggere gli occhi / il viso.

P301+P312: IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

P305+P351+P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

P310: Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

P330: Sciacquare la bocca.

Contiene: SODIO PERCARBONATO
 Tensioattivi anionici

SteriCold è un dispositivo medico disinfettante di classe IIb ai sensi e per gli effetti della direttiva CE 93/42 e succ. M.I.

USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE

CE
0546

DISTRIBUITO IN ESCLUSIVA da
DEI® italia s.r.l.
 21020 Mercurio (VA) Italy
 Tel. +39 0331 969270



MONDIAL S.n.c.
 35010 Limena (PD) Italy
 Tel. +39 049 768712



Attenersi scrupolosamente alle istruzioni d'uso

LOT



Rev. 06/2015



PERICOLO